

Primarna skupina	Značilnosti skupine	Uporaba	Lastniško ime	Alternativna skupina	Anti-mikrobna obloga	Podskupina (dodatki)	Za količino izločka	Potreba po sekundarni
alginati	Močno vpojne obloge, običajno iz natrijevih in/ali kalcijevih soli (rjavih morskih alg). Vpijajo izločke, pri čemer tvorijo mehak gel. Lahko so samostojni, nanešeni na druge materiale ali le dodatek drugih sodobnih oblog. Pogosto v obliki polnil za žepe in globlje rane. Vsebujejo lahko dodatke, kot so hidrokoloidi, srebro, med ali kombinacijo različnih dodatkov. Zaradi izmenjave ionov imajo nekatere tudi dokazan hemostatski učinek.	Za rane z zmernim do močnim izločanjem, predvsem v kombinaciji z antimikrobnimi sredstvi za okužene rane. Ali, kjer dokazano, za rane z biofilmom. Za rahlo krvaveče rane, kjer se pričakuje več izločka.	Biatain Alginate			obloge z dodatkom hidrokoloidov	zmerno do močno	da
			Kaltostat				zmerno do močno	da
			Melgisorb Ag		da	obloge z dodatkom srebra	zmerno do močno	da
			Melgisorb Plus				zmerno do močno	da
			Silvercel Hydro-Alginate		da	obloge z dodatkom srebra in	zmerno do močno	da
			Silvercel Non-Adherent		da	obloge z dodatkom srebra in	zmerno do močno	da
			Sorbalgon				zmerno do močno	da
			Suprasorb A				zmerno do močno	da
			Suprasorb A PRO				zmerno do močno	da
			Suprasorb A+Ag		da	obloge z dodatkom srebra	zmerno do močno	da
			Suprasorb PRO+Ag		da	obloge z dodatkom srebra	zmerno do močno	da
			Tegaderm Alginate Ag		da	obloge z dodatkom srebra	zmerno do močno	da
			Tegaderm High Integrity Alginate				zmerno do močno	da
Vivamel alginat		medene obloge	da	obloge z dodatkom medu	zmerno do močno	da		

biocelulozne obloge	Hidroaktivne obloge iz biosintetizirane celuloze, ki uravnavajo vlažnost rane in blažijo bolečino. Lahko vsebujejo antimikrobni dodatek.	Za rane z malo do zmernim izločanjem v vnetni in proliferativni fazi. Z antimikrobnim dodatkom za okužene rane.	Suprasorb X				brez do zmerno	da
			Suprasorb X+PHMB		da	obloge z dodatkom PHMB	brez do zmerno	da
filmi	Izjemno tanke poliuretanske membrane, omogočajo izmenjavo plinov, ne prepuščajo mikroorganizmov in izločkov. Omogočajo akumulacijo mediatorjev celjenja na površini rane.	Kot primarna obloga za rane z malo izločka v fazi epitelizacije.	Hydrofilm				brez do malo	ne
			Mepitel Film	obloge s silikonom			brez do malo	ne
			Mepore Film					ne
			Suprasorb F				brez do malo	ne
			XTRATA rola				brez do malo	ne
gelirajoče obloge	Obloge iz visoko vpojnih vlaken, ki ob stiku z izločkom tvorijo gel. So samostojne vlaknaste obloge, ki lahko vsebujejo dodatke, ali pa so kombinirane z drugimi materiali (predvsem peno). Vzdržujejo vlažno okolje ter vpijajo izloček. Odvisno od sestave in dodatkov nekatere zmanjšujejo bakterijsko breme, delujejo antimikrobno in vplivajo na biofilm.	Za rane v fazi vnetja in proliferacije, predvsem z zmernim do močnim izločanjem. Nekatere antimikrobne obloge dokazano primerne za rane z biofilmom in okužene rane.	Aquacel Ag		da	obloge z dodatkom srebra	malo do močno	da
			Aquacel Ag+ Extra		da	obloge z dodatkom srebra in dezinficijensov	malo do močno	da
			Aquacel Extra				malo do močno	da
			Aquacel Foam Adhesive	pene			malo do močno	ne

			Aquacel Foam Non Adhesive	pene			malo do močno	da fiks
			Exufiber				zmerno do močno	da
			Exufiber Ag				zmerno do močno	da
			Suprasorb Liquacel				zmerno do močno	da
			Suprasorb Liquacel Ag		da	obloge z dodatkom srebra	zmerno do močno	da
hidrogeli	Obloge z visoko vsebnostjo vode, pogosto z dodatki, nekatere tudi z antimikrobnimi. So v amorfni obliki, kot trdne obloge, ki se spremenijo v gel ob stiku z izločkom, ali kot dodatek oblogam. Rani dodajajo vlažnost, nekateri tudi vpijajo. Mehčajo mrtvine in obloge in omogočajo avtolizo. Pogosto blažilni učinek na bolečine. Nekateri zaradi antimikrobnih dodatkov dokazano učinkujejo na bakterije in biofilm.	Za rane, ki potrebujejo dodatno vlažnost, za rane z mrtvinami in oblogami, za zagotavljanje vlažnega okolja pri ranah, ki malo izločajo ali so izsušene. Tiste z antimikrobnimi dodatki primerni za okužene rane in rane z biofilmom.	Comfeel Purilon			obloge z dodatkom alginatov in hidrokoloidov	malo do zmerno	da
			Cutimed Gel				malo do zmerno	da
			Granugel			obloge z dodatkom pektina	brez do malo	da
			HydroTac transparent				brez do malo	da
			HydroTac transparent comfort				brez do malo	ne
			Hydrosorb Gel			obloge z dodatkom Ringerjeve	brez do malo	da
			Nu-Gel			obloge z dodatkom alginatov	malo do močno	da
			Suprasorb G (dressing)				malo do zmerno	da
			Suprasorb G (gel)			obloge z dodatkom hidrokoloidov	malo do zmerno	da
			Tegaderm Hydrogel Wound Filler				brez do malo	da

hidrokoloide	Hidrofilne obloge iz hidrokolooidnih snovi, kot so karboksimetil celuloze (CMC), želatina, pektini, ki pri stiku z izločkom rane tvorijo gel. Pogosto okluzivne, nekatere z dodatki za povečanje vpojnosti. Lahko tudi kot pasta, ali kot dodatki hidrogelom ali drugim oblogam. So tanke ali debele, brez roba ali z lepljivim robom, klasičnih ali posebnih oblik (za trtico). Zagotavljajo vlažno okolje, okluzivne tudi hipoksično okolje, kar pozitivno vpliva na epitelizacijo in angiogenezo. Ščitijo okolno kožo.	Za rane z malo do zmernim izločanjem v vnetni in proliferativni fazi. Za zaščito ranljivih površinskih epitelizirajočih ran in ogrožene kože.	Comfeel Plus			obloge z dodatkom alginatov	malo do zmerno	ne
			Comfeel Plus Transparent				malo do zmerno	ne
			Cutimed Hydro B				malo do zmerno	ne
			Cutimed Hydro L				brez do malo	ne
			Granuflex			obloge z dodatkom pektina, želatine	brez do zmerno	ne
			Bordered Granuflex			obloge z dodatkom pektina, želatine,	brez do zmerno	ne
			Granuflex Extra Thin			obloge z dodatkom pektina, želatine	brez do zmerno	ne
			HydroColl				malo do zmerno	ne
			HydroColl Thin				malo do zmerno	ne
			Suprasorb H Standard				malo do zmerno	ne
			Suprasorb H Thin				malo do zmerno	ne
			Tegaderm Hydrocolloid				malo do zmerno	ne
			Tegaderm Hydrocolloid Thin				malo do zmerno	ne
kolagenske obloge	Obloge iz naravnega kolagena. Stimulirajo tvorbo novega kolagena,	Za rane, ki ne napredujejo. V vnetni ali proliferativni fazi, z	Promogran				malo do močno	da

	zmanjsujejo delovanje proteaz, podpirajo celično migracijo. Lahko so kombinirane z drugimi materiali (npr. regenerirano oksidirano celulozo) in/ ali z antimikrobnimi dodatki.	dodatkom antimikrobnih sredstev za okužene rane.	Promogran Prisma		da	obloge z dodatkom srebra	malo do močno	da
			Suprasorb C				malo do močno	da
kontaktne mrežice	Mrežice iz različnih nosilnih materialov, pogosto z dodatki za dodatno zaščito ran ali z antimikrobnim delovanjem. Preprečujejo sprijemanje sekundarnih oblog z rano in omogočajo prehod izločka v sekundarno oblogo, obenem pa rano ščitijo.	Za boleče rane in rane z ranljivim tkivom v vnetni in proliferativni fazi, z malo do zmerno izločka. Z dodatki antimikrobnih učinkovin za okužene rane.	Adaptic			obloge z dodatkom vazelina	malo do zmerno	da
			Adaptic Digit Non-Adherent	obloge s silikonom			malo do zmerno	ne
			Adaptic Digit Toe	obloge s silikonom			malo do zmerno	ne
			Adaptic Touch	obloge s silikonom			malo do zmerno	da
			Atrauman			obloge z dodatkom trigliceridov	malo do zmerno	da
			Atrauman Ag		da	obloge z dodatkom srebra	malo do zmerno	da
			Atrauman Silicone	obloge s silikonom			malo do zmerno	da
			Cuticell			obloge z dodatkom lanolina	malo do zmerno	da
			Cuticell Classic			obloge z dodatkom vazelina	malo do zmerno	da
			Cuticell Contact	obloge s silikonom			malo do zmerno	da
			Cutimed Sorbion Plus				malo do zmerno	da
			Grassolind			obloge z dodatkom vazelina	malo do zmerno	da

			Inadine	netkane/tkane obloge z dodatki	da	obloge z dodatkom povidon jodida	malo do močno	da
			Lomatuel H			obloge z dodatkom vazelina	malo do zmerno	da
			Lomatuel H PRO		ne	obloge z dodatkom vazelina	malo do zmerno	da
			Mepitel	obloge s silikonom		obloge s silikonom	srednje do veliko	da
			Mepitel One	obloge s silikonom		obloge s silikonom	srednje do veliko	da
medene obloge	Vsebujejo medicinski med v samostojni obliki (v tubi) ali v kombinaciji z različnimi materiali. Med deluje antimikrobno na širok spekter mikroorganizmov, vključno z rezistentnimi sevi. Spodbuja avtolitičen debridement, deluje protivnetno in preprečuje neprijeten vonj.	Za rane z mrtvinami in oblogami, za rane v vnetni fazi ter za okužene rane, za granulirajoče rane.	Vivamel contact	medene obloge	da	obloge z dodatkom medu	malo do zmerno	da
			Vivamel alginat	alginati	da	obloge z dodatkom medu	zmerno do močno	da
			Vivamel contact	kontaktne mrežice	da	obloge z dodatkom medu	malo do zmerno	da
			Vivamel medicinski med		da		brez do zmerno	da
			Vivamel Protect	pene	da	obloge z dodatkom medu	malo do zmerno	ne
obloge s silikonom	Stična plast z rano je prevlečena s silikonom, ki je hidrofoben material, zato se z rano ne sprime. Ščiti rane. omogoča	Za rane, ki so boleče, ranljive, z ranljivo in za maceracijo ogroženo okolno kožo v vnetni in proliferativni fazi. z malo	Adaptic Digit Non-Adherent	kontaktne mrežice			malo do zmerno	ne
			Adaptic Digit Toe	kontaktne mrežice			malo do zmerno	ne

neboleče menjave obloge brez poškodbe novo nastalega tkiva, preprečujejo bolečine in maceracijo okolne kože. Na voljo v različnih oblikah (pene, kontaktne mrežice, filmi), v različnih debelinah, brez ali z dodatnim robom, ter z antimikrobnimi dodatki.

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
do močno količino izločkov (odvisno od oblike). Za okužene rane, kadar vsebujejo antimikrobne dodatke.

Adaptic Touch	kontaktne mrežice			malo do zmerno	da
Atrauman Silicone	kontaktne mrežice			malo do zmerno	da
Biatain Silicone	pene		obloge z dodatkom SAP	zmerno do močno	ne
Biatain Silicone Ag	pene	da	obloge z dodatkom srebra	zmerno do močno	ne
Biatain Silicone Lite	pene			zmerno	ne
Cuticell Contact	kontaktne mrežice			malo do zmerno	da
Cutimed Siltec	pene		obloge z dodatkom SAP	zmerno do močno	da
Cutimed Siltec Sorbact	pene	da	obloge z dodatkom DACC in SAP	zmerno do močno	ne
Mepilex	PU pene braz roba			zmerno do močno	ne
Mepilex XT	PU pene braz roba			gost izložek, zmerno do močno	ne
Mepilex Ag	PU pene braz roba	da	obloge z dodatkom srebra	zmerno do močno	ne
Mepilex Border Flex Oval	sestavljene obloge s PU peno z			zmerno do močno	ne
Mepilex Border Ag	PU pene z robom	da	obloge z dodatkom srebra	zmerno do močno	ne
Mepilex Border Flex	sestavljene obloge s PU peno z robom-			zmerno do močno	ne


Mepilex Border HEEL	sestavljene obloge s PU				
Mepilex Border Flex Sacrum	sestavljene obloge s PU				
Mepilex Border Flex Lite	PU pene			malo do zmerno	ne
Mepilex EM	PU pene			malo do zmerno	ne
Mepilex Transfer	PU pena brez zaščitnega filma			zmerno do močno	da
Mepilex Transfer Ag	PU pena brez zaščitnega filma	da	obloge z dodatkom srebra	zmerno do močno	da
Mepitel	kontaktne mrežice			malo do zmerno	da
Mepitel Film	filmi			brez do malo	ne
Mepitel One	kontaktne mrežice			malo do zmerno	da
RespoSorb Silicone	obloge s silikonom			zmerno do močno	da
RespoSorb Silicone Border	obloge s silikonom			zmerno do močno	ne
Suprasorb P Sensitive Border	pene			zmerno do močno	ne
Suprasorb P Silicone Bordered	pene			zmerno do močno	ne
Suprasorb P Sensitive Border Lite	pene			malo do zmerno	ne
Suprasorb P Silicone Non-Bordered	pene			zmerno do močno	da



			Suprasorb P Sensitive Non-Border	pene			zmerno do močno	da
			Tegadern Silicone Foam	pene			malo do močno	ne
pene	Običajno narejene iz poliuretanov, lahko tudi iz drugih materialov. Debele ali tanke, z različnim številom slojev, z lepljivim robom ali brez, klasičnih oblik ali posebnih oblik za bolj zahtevne anatomske predele ( npr. za križnico, peto, komolec), brez dodatkov ali z zelo raznolikimi dodatki-antimikrobnimi sredstvi, silikonsko stično plastjo, hidrogelom, protibolečinskim sredstvom, gelirajočimi vlakni in z drugimi dodatki. Glavni namen je vpijanje in uravnavanje vlažnosti rane. Rani nudijo tudi toplotno izolacijo in dodatno zaščito.	Za rane z izločanjem v vseh fazah celjenja-sposobnost vpijanja odvisna od oblike. V kombinaciji z antimikrobnimi dodatki za okužene rane, v kombinaciji z dodatkom ibuprofena za boleče rane	Aquacel Foam Adhesive	gelirajoče obloge		obloge s hidrofibro, silikonskim lepilnimi	malo do močno, zaščita kože	ne
			Aquacel Foam Non Adhesive	gelirajoče obloge		obloge s hidrofibro, brez leplinega roba	malo do močno, zaščita kože	da
			Biatain AD				zmerno do močno	ne
			Biatain Ag AD		da	obloge z dodatkom srebra	zmerno do močno	ne
			Biatain Ag NA		da	obloge z dodatkom srebra	zmerno do močno	da
			Biatain IBU			obloge z dodatkom ibuprofena	zmerno do močno	da
			Biatain NA				zmerno do močno	da
			Biatain Silicone	obloge s silikonom		obloge z dodatkom SAP	zmerno do močno	ne
			Biatain Silicone Ag	obloge s silikonom	da	obloge z dodatkom srebra	zmerno do močno	ne
			Biatain Silicone Lite	obloge s silikonom			zmerno	ne
			Cutimed Cavity				zmerno do močno	da
			Cutimed Siltec	obloge s silikonom		obloge z dodatkom SAP	zmerno do močno	da
			Cutimed Siltec Sorbact	obloge s silikonom	da	obloge z dodatkom DACC in SAP	zmerno do močno	ne
			HydroTac			obloge z dodatkom hidrogela	malo do zmerno	da



HydroTac Comofort			obloge z dodatkom hidrogela	malo do zmerno	ne
Lyofom Max				zmerno do močno	da
Mepilex	PU pene brez roba			zmerno do močno	ne
Mepilex XT	PU pene brez roba			gost izložek, zmerno do močno	ne
Mepilex Ag	PU pene brez roba	da	obloge z dodatkom srebra	zmerno do močno	ne
Mepilex Border Flex Oval	sestavljene obloge s PU peno z			zmerno do močno	ne
Mepilex Border Ag	PU pene z robom	da	obloge z dodatkom srebra	zmerno do močno	ne
Mepilex Border Flex	sestavljene obloge s PU peno z robom-			zmerno do močno	ne
Mepilex Border HEEL	sestavljene obloge s			zmerno do močno	
Mepilex Border Flex Sacrum	sestavljene obloge s			zmerno do močno	
Mepilex Border Flex lite	PU pene			malo do zmerno	ne
Mepilex EM	PU pene			malo do zmerno	ne
Mepilex Transfer	PU pena brez zaščitnega filma			zmerno do močno	da

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

Mepilex Transfer Ag	PU pena brez zaščitnega	da	obloge z dodatkom srebra	zmerno do močno	da
PermaFoam Classic	PU pena			zmerno do močno	da
PermaFoam Classic Comfort	PU pena z lepilnim			zmerno do močno	ne
Suprasorb P +PHMB		da	obloge z dodatkom PHMB	zmerno do močno	da
Suprasorb P adhesive				zmerno do močno	ne
Suprasorb P non-adhesive				zmerno do močno	da
Suprasorb P Silicone Bordered	obloge s silikonom			zmerno do močno	ne
Suprasorb P Silicone Non-Bordered	obloge s silikonom			zmerno do močno	da
Tegaderm High Performance Foam				malo do močno	ne
Tegaderm High Performance Foam Non-				malo do močno	da
Tegaderm Silicone Foam	obloge s silikonom			malo do močno	ne
Vivamel Protect	medene obloge	da	obloge z dodatkom medu	malo do zmerno	ne

poliakrilatne vlažne obloge	Obloge, ki vsebujejo z Ringerjevo raztopino navlažene poliakrilate v matrici znotraj ovoja. Ob stiku z izločkom rane sproščajo Ringerjevo raztopino v rano in vpijajo izloček. Spodbujajo avtolizo mrtvin ter čiščenje rane	Za rane z mrtvinami, nevitalnimi in fibrinskimi oblogami, za rane v vnetni fazi z malo do veliko izločka.	HydroClean Advance	hidrogeli		obloge z dodatkom Ringerjeve raztopine	brez do močno	da
polimerne membrane	Obloge, ki v poliuretanskem matriksu vsebujejo čistilno sredstvo, glicerol ter kopolimer škroba. Spodbujajo čiščenje in avtolitični debridement, delujejo protivnetno in protibolečinsko, lahko vsebujejo antimikrobno komponento (srebro).	Za rane v vseh fazah celjenja, izbor odvisen od količine izločka, globine rane in tveganja za okužbo.	Polymem WIC				brez do močno	da
			Polymem WIC Silver		da	obloge z dodatkom srebra	brez do močno	da
			Polymem Film				brez do zmerno	ne
			Polymem Finger				brez do zmerno	da
			Polymem MAX				zmerno do močno	da
			Polymem MAX Film				zmerno do močno	ne
			Polymem MAX Silver		da	obloge z dodatkom srebra	zmerno do močno	da
			Polymem Non- Adhesive				brez do zmerno	da
			Polymem Silicon Border (#8)	obloge s silikonom			brez do zmerno	ne
			Polymem Silicon Border Silver (#5)	obloge s silikonom	da	obloge z dodatkom srebra	brez do zmerno	ne

			Polymem Silver Finger		da	obloge z dodatkom srebra	brez do zmerno	da
			Polymem Silver Non-Adhesive		da	obloge z dodatkom srebra	brez do zmerno	da
netkane/tkane obloge z dodatki	Obloge iz netkanih in tkanih materialov , ki, odvisno od dodatka, vzpodbujajo čiščenje ran , vežejo in zmanjšujejo bakterijsko breme in/ali preprečujejo neprijeten vonj.	Glede na dodatek za rane v vnetni fazi, za kolonizirane in okužene rane, za rane z neprijetnim vonjem.	Actisorb Plus 25		da	obloge z dodatkom oglja in srebra	zmerno	da
			Curea P1 Duo			obloge z dodatkom SAP	malo do močno	da
			Curea P1 Duo Active			obloge z dodatkom SAP in oglja	malo do močno	da
			Curea P2 Active			obloge z dodatkom SAP in oglja	malo do močno	da
			Cutimed Sorbact			obloge z dodatkom DACC	malo do močno	da
			Inadine	kontaktne mrežice	da	obloge z dodatkom povidon jodida	malo do močno	da
			Mesalt			obloge z dodatkom NaCl	močno do zelo močno	da
			Vliwaktiv			obloge z dodatkom oglja	zmerno do močno	da
			Vliwaktiv Ag		da	obloge z dodatkom oglja in srebra	zmerno do močno	da

visoko vpojne obloge	Sposobne vpijanja velikih količin izločkov. Pogosto vsebujejo SAP (visoko vpojne polimere). Zmanjšujejo tveganje za iztekanje izločka ter maceracijo, zmanjšujejo potrebo po pogostih prevezah ran. Lahko brez lepilnega roba ali z njim.	Za rane z zelo močnim izločanjem, kot so na primer maligne rane in rane z limfedemi.	Biatain Super AD			obloge z dodatkom SAP	močno do zelo močno	ne
			Biatain Super NA			obloge z dodatkom SAP	močno do zelo močno	da
			Cutimed Sorbion Sachet Border			obloge z dodatkom SAP	zmerno do močno	ne
			Cutimed Sorbion Sachet S			obloge z dodatkom SAP	zmerno do močno	da
			Mextra Superabsorbent			obloge z dodatkom SAP	močno do zelo močno	da
			Resposorb Super			obloge z dodatkom SAP	močno do zelo močno	da
			RespoSorb Silicone			obloge z dodatkom SAP in silikona	močno do zelo močno	da
			RespoSorb Silicone Border			obloge z dodatkom SAP in silikona	močno do zelo močno	ne
			Vliwasorb			obloge z dodatkom SAP	močno do zelo močno	da
			Vliwasorb adhesive			obloge z dodatkom SAP	močno do zelo močno	ne
			Vliwasorb PRO		ne	obloge z dodatkom SAP	močno do zelo močno	da
večnamenske obloge s SuperCure jedro	večnamenska obloga zasnovana na SuperCore tehnologiji. Na strani, ki gre na rano ima netkano plas za nežen debridment in jedro iz naravnih vlaken in natrijevega poliakrilata, ki se ne poveša z varjenimi robovi. Vsebuje visokovpojne materiale	za vse rane z veliko izločka, tudi z visoko viskozne izločke. Za rane z zmernim izločkom do ran z veliko izločka, ter težko zaceljive rane.	Curea P1			SuperCure tehnologija	zmerno do zelo močno	ne
			Curea P2 Duo active			SuperCure tehnologija +	zmerno do zelo močno	ne
			Curea P2 Active			SuperCure tehnologija +	zmerno do zelo močno	ne
			Curea P2			SuperCure tehnologija + mrežica iz polietilena	zmerno do zelo močno	ne

akrilati	<p>Prozorne akrilne obloge so izdelane iz poliuretanskega filma na zgornji in spodnji površini, med obema slojema pa je vgrajeno akrilno polimerno jedro, ki ima možnost vpijanja izločka. Spodnji-stični sloj filma in lepilo na njem sta perforirana, kar omogoča prehanje izločka v akrilno jedro. Obloge so prozorne in omogočajo opazovanje rane tudi kadar je izloček že absorbiran v akrilno jedro. Prozorna akrilna obloga omogoča prehajanje vodni pari iz strani kože in prehod plinom, kar omogoča normalno funkcijo kože, hkrati pa je obloga popolna bariera za mikroorganizme, tekočine in nesnago. Namenjena je za rane z malo do zmerno količino izločka.</p>	<p>Za pitve rane z malo do zmerno količino izločka v vseh fazah celjenja. Namenjene tudi zaščiti in opazovanju kirurško zaprtih incizij. Kot preventiva namenjene zaščiti ogrožene, nepoškodovane kože pri prisotnem trenju in strižnih silah. Za plitve razjede, raztrganine kože, razjede zaradi pritiska, abrazije, površinske opekline, donorska mesta in čiste, zaprte kirurške incizije ali laparoskopske incizije.</p>	Tegaderm Absorbent Clear Acrylic				brez do zmerno	ne
----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------	--	--	--	----------------	----

obloge z bakrom	<p>obloge z bakrom delujejo antiviralno, antifungicidno in antibakterijsko, vplivajo na angiogenezo in regeneracijo kože - pospešujejo celjenje ran. Lahko se jih uporablja v različnih fazah celjenja. Vsebujejo notranjo visoko-vpojno plast ( 8 – 10 x teža obloge oz. 165µL/cm<sup>2</sup>) s tkanine iz viskoznih vlaken, ki imajo gostoto 1,4 in dolžino 38mm ter 3 % vlaken prevlečenih z bakrovim oksidom iz celuloze</p> <p>zunanja plast sestavlja hidrofobna vezna plast iz polipropilenskih vlaken, impregniranih z 2,3 % teže delcev bakrovega oksida</p>	za akutne in kronične rane( venski in arterijski ulkusi, diabetične razjede, RZP,..., rane ki se slabo celijo in močno kolonizirane in okužene rane	Dvoslojna obloga z bakrom,		da	z dodatkom bakra	malo do zmerno	ne
			Troslojna obloga z bakrom - polnilo		da	z dodatkom bakra	malo do zmerno	ne



<b>Posebnosti v obliki</b>	<b>Po potrebi primerno kot sekund</b>	<b>Proizvajalec</b>	<b>Dobavitelj</b>
različne dimenzije, polnila	ne	Coloplast	Medikal Lux d.o.o.
različne dimenzije, polnila	ne	ConvaTec	Valencia Stoma-Medical
različne dimenzije, polnila	ne	Mölnlycke	Simps'S
različne dimenzije, polnila	ne	Mölnlycke	Simps'S
različne dimenzije, polnila	ne	3M-Systagenix	MM Surgical d.o.o.
različne dimenzije	ne	3M-Systagenix	MM Surgical d.o.o.
različne dimenzije, polnila	ne	Hartmann	Hartmann
različne dimenzije, polnila	ne	Lohmann & Rauscher	Lohmann & Rauscher
različne dimenzije, polnila	ne	Lohmann & Rauscher	Lohmann & Rauscher
različne dimenzije, polnila	ne	Lohmann & Rauscher	Lohmann & Rauscher
različne dimenzije, polnila	ne	Lohmann & Rauscher	Lohmann & Rauscher
različne dimenzije	ne	3M	MM Surgical d.o.o.
različne dimenzije, polnila	ne	3M	MM Surgical d.o.o.
različne dimenzije	ne	Tosama	Tosama

različne dimenzije, polnila	ne	Lohmann & Rauscher	Tosama
različne dimenzije, polnila	ne	Lohmann & Rauscher	Tosama
različne dimenzije	da	Hartmann	Hartmann
različne dimenzije	da	Mölnlycke	Simps'S
različne dimenzije	da	Mölnlycke	Simps'S
različne dimenzije	da	Lohmann & Rauscher	Lohmann & Rauscher
različne dimenzije	da	Mediset slinical products GmbH	Zaloker & Zaloker d.o.o.
različne dimenzije, polnila	ne	ConvaTec	Valencia Stoma-Medical
različne dimenzije, polnila	ne	ConvaTec	Valencia Stoma-Medical
različne dimenzije, polnila	ne	ConvaTec	Valencia Stoma-Medical
različne dimenzije, oblike za zahtevne anatomske	da	ConvaTec	Valencia Stoma-Medical d.o.o.

različne dimenzije	da	ConvaTec	Valencia Stoma-Medical d.o.o.
različne dimenzije	ne	Mölnlycke	Simps'S
različne dimenzije	ne	Mölnlycke	Simps'S
različne dimenzije	ne	Lohmann & Rauscher	Lohmann & Rauscher
različne dimenzije	ne	Lohmann & Rauscher	Lohmann & Rauscher
amorfná (npr. gel, pasta)	ne	Coloplast	Medikal Lux d.o.o.
amorfná (npr. gel, pasta)	ne	BSN Medical	Kastor
amorfná (npr. gel, pasta)	ne	ConvaTec	Valencia Stoma-Medical
različne dimenzije	ne	Hartmann	Hartmann
različne dimenzije	ne	Hartmann	Hartmann
amorfná (npr. gel, pasta)	ne	Hartmann	Hartmann
amorfná (npr. gel, pasta)	ne	3M-Systagenix	MM Surgical d.o.o.
različne dimenzije	ne	Lohmann & Rauscher	Lohmann & Rauscher
amorfná (npr. gel, pasta)	ne	Lohmann & Rauscher	Lohmann & Rauscher
amorfná (npr. gel, pasta)	ne	3M	MM Surgical d.o.o.

različne dimenzije, oblike za zahtevne anatomske stanjšane, različne dimenzije	ne	Coloplast	Medikal Lux d.o.o.
različne dimenzije, oblike za zahtevne anatomske stanjšane, različne dimenzije	ne	Coloplast	Medikal Lux d.o.o.
različne dimenzije, oblike za zahtevne anatomske stanjšane, različne dimenzije	ne	BSN Medical	Kastor
različne dimenzije	ne	BSN Medical	Kastor
različne dimenzije	da	ConvaTec	Valencia Stoma-Medical
za zahtevne anatomske predele	da	ConvaTec	Valencia Stoma-Medical
stanjšane, različne dimenzije	da	ConvaTec	Valencia Stoma-Medical
za zahtevne anatomske predele	ne	Hartmann	Hartmann
stanjšane, različne dimenzije	ne	Hartmann	Hartmann
različne dimenzije	ne	Lohmann & Rauscher	Lohmann & Rauscher
stanjšane, različne dimenzije	ne	Lohmann & Rauscher	Lohmann & Rauscher
različne dimenzije	da	3M	MM Surgical d.o.o.
stanjšane, različne dimenzije	da	3M	MM Surgical d.o.o.
različne dimenzije	ne	3M-Systagenix	MM Surgical d.o.o.

različne dimenzije	ne	3M-Systagenix	MM Surgical d.o.o.
različne dimenzije	ne	Lohmann & Rauscher	Lohmann & Rauscher
različne dimenzije	ne	3M-Systagenix	MM Surgical d.o.o.
za prste na roki	ne	3M-Systagenix	MM Surgical d.o.o.
za prste na nogi	ne	3M-Systagenix	MM Surgical d.o.o.
različne dimenzije	ne	3M-Systagenix	MM Surgical d.o.o.
različne dimenzije	ne	Hartmann	Hartmann
različne dimenzije	ne	Hartmann	Hartmann
različne dimenzije	ne	Hartmann	Hartmann
različne dimenzije	ne	BSN Medical	Kastor
različne dimenzije	ne	BSN Medical	Kastor
različne dimenzije	ne	BSN Medical	Kastor
različne dimenzije	ne	BSN Medical	Kastor
različne dimenzije	ne	Hartmann	Hartmann

različne dimenzije	ne	3M-Systagenix	MM Surgical d.o.o.
različne dimenzije	ne	Lohmann & Rauscher	Lohmann & Rauscher
različne dimenzije	ne	Lohmann & Rauscher	Lohmann & Rauscher
različne dimenzije	da	Mölnlycke	Simps'S
različne dimenzije	da	Mölnlycke	Simps'S
različne dimenzije	ne	Tosama	Tosama
različne dimenzije	ne	Tosama	Tosama
različne dimenzije	ne	Tosama	Tosama
amorfna (npr. gel, pasta)	ne	Tosama	Tosama
	ne	Tosama	Tosama
različne dimenzije			
za prste na roki	ne	3M-Systagenix	MM Surgical d.o.o.
za prste na nogi	ne	3M-Systagenix	MM Surgical d.o.o.

različne dimenzije	ne	3M/Systagenix	MM Surgical d.o.o.
različne dimenzije	ne	Hartmann	Hartmann
stanjšane, različne dimenzije, oblike za zahtevne anatomske predele	da	Coloplast	Medikal Lux d.o.o.
različne dimenzije	ne	Coloplast	Medikal Lux d.o.o.
stanjšane, različne dimenzije	da	Coloplast	Medikal Lux d.o.o.
različne dimenzije	ne	BSN Medical	Kastor
različne dimenzije, oblike za zahtevne anatomske predele	da	BSN Medical	Kastor
različne dimenzije	ne	BSN Medical	Kastor
različne dimenzije, oblike za zahtevne anatomske predele	da	Mölnlycke	Simps'S
različne dimenzije	da	Mölnlycke	Simps'S
različne dimenzije	da	Mölnlycke	Simps'S
različne dimenzije, oblike za zahtevne anatomske predele	da	Mölnlycke	Simps'S
različne dimenzije, oblike za zahtevne anatomske predele	da	Mölnlycke	Simps'S
različne dimenzije, oblike za zahtevne anatomske predele	da	Mölnlycke	Simps'S

stanjšane, različne dimenzije	ne	Mölnlycke	Simps'S
stanjšane, različne dimenzije	da	Mölnlycke	Simps'S
različne dimenzije	ne	Mölnlycke	Simps's
različne dimenzije	ne	Mölnlycke	Simps's
različne dimenzije	ne	Mölnlycke	Simps's
različne dimenzije	da	Mölnlycke	Simps's
različne dimenzije	ne	Mölnlycke	Simps's
različne dimenzije	da	Hartmann	Hartmann
različne dimenzije	da	Hartmann	Hartmann
različne dimenzije	da	Lohmann & Rauscher	Lohmann & Rauscher
različne dimenzije	da	Lohmann & Rauscher	Lohmann & Rauscher
različne dimenzije	da	Lohmann & Rauscher	Lohmann & Rauscher
različne dimenzije	da	Lohmann & Rauscher	Lohmann & Rauscher



različne dimenzije	da	Lohmann & Rauscher	Lohmann & Rauscher
različne dimenzije, oblike za zahtevne anatomske	da	3M	MM Surgical d.o.o.
različne dimenzije, oblike za zahtevne anatomske	da	ConvaTec	Valencia Stoma-Medical
različne dimenzije	da	ConvaTec	Valencia Stoma-Medical
različne dimenzije	da	Coloplast	Medikal Lux d.o.o.
različne dimenzije	ne	Coloplast	Medikal Lux d.o.o.
različne dimenzije	ne	Coloplast	Medikal Lux d.o.o.
različne dimenzije	ne	Coloplast	Medikal Lux d.o.o.
različne dimenzije	da	Coloplast	Medikal Lux d.o.o.
različne dimenzije, oblike za zahtevne anatomske predele	da	Coloplast	Medikal Lux d.o.o.
različne dimenzije	ne	Coloplast	Medikal Lux d.o.o.
stanjšane, različne dimenzije	da	Coloplast	Medikal Lux d.o.o.
polnilo	da	BSN Medical	Kastor
različne dimenzije, oblike za zahtevne anatomske	da	BSN Medical	Kastor
različne dimenzije	ne	BSN Medical	Kastor
različne dimenzije	da	Hartmann	Hartmann

za zahtevne anatomske predele	da	Hartmann	Hartmann
različne dimenzije	da	Mölnlycke	Simps'S
različne dimenzije, oblike za zahtevne anatomske predele	da	Mölnlycke	Simps'S
različne dimenzije	da	Mölnlycke	Simps'S
različne dimenzije	da	Mölnlycke	Simps'S
različne dimenzije, oblike za zahtevne anatomske predele	da	Mölnlycke	Simps'S
različne dimenzije, oblike za zahtevne anatomske predele	da	Mölnlycke	Simps'S
različne dimenzije, oblike za zahtevne anatomske predele	da	Mölnlycke	Simps'S
za zahtevne anatomske predele	da	Mölnlycke	Simps'S
za zahtevne anatomske predele	da	Mölnlycke	Simps'S
stanjšane, različne dimenzije	da	Mölnlycke	Simps'S
stanjšane, različne dimenzije	da	Mölnlycke	Simps'S
različne dimenzije	ne	Mölnlycke	Simps's

različne dimenzije	ne	Mölnlycke	Simps's
različne dimenzije, polnila	da	Hartmann	Hartmann
za zahtevne anatomske predele	da	Hartmann	Hartmann
različne dimenzije	da	Lohmann & Rauscher	Lohmann & Rauscher
različne dimenzije	da	Lohmann & Rauscher	Lohmann & Rauscher
različne dimenzije	da	Lohmann & Rauscher	Lohmann & Rauscher
različne dimenzije	da	Lohmann & Rauscher	Lohmann & Rauscher
različne dimenzije	da	Lohmann & Rauscher	Lohmann & Rauscher
za anatomske zahtevne predele	da	3M	MM Surgical d.o.o.
različne dimenzije	ne	3M	MM Surgical d.o.o.
različne dimenzije, oblike za zahtevne anatomske	da	3M	MM Surgical d.o.o.
različne dimenzije	ne	Tosama	Tosama

različne dimenzije, polnila	ne	Hartmann	Hartmann
polnilo	ne	Ferris	Zaloker & Zaloker d.o.o.
polnilo	ne	Ferris	Zaloker & Zaloker d.o.o.
različne dimenzije, oblike za zahtevne anatomske predele	da	Ferris	Zaloker & Zaloker d.o.o.
za prste	da	Ferris	Zaloker & Zaloker d.o.o.
različne dimenzije	da	Ferris	Zaloker & Zaloker d.o.o.
različne dimenzije	da	Ferris	Zaloker & Zaloker d.o.o.
različne dimenzije	da	Ferris	Zaloker & Zaloker d.o.o.
različne dimenzije	da	Ferris	Zaloker & Zaloker d.o.o.
različne dimenzije	ne	Ferris	Zaloker & Zaloker d.o.o.
različne dimenzije	ne	Ferris	Zaloker & Zaloker d.o.o.

za prste	da	Ferris	Zaloker & Zaloker d.o.o.
različne dimenzije	da	Ferris	Zaloker & Zaloker d.o.o.
različne dimenzije	ne	3M-Systagenix	MM Surgical d.o.o.
različne dimenzije	ne	Curea Medical	Zaloker & Zaloker d.o.o.
različne dimeznije	ne	Curea Medical	Zaloker & Zaloker d.o.o.
različne dimeznije	ne	Curea Medical	Zaloker & Zaloker d.o.o.
različne dimenzije	ne	BSN Medical	Kastor
različne dimenzije	ne	3M-Systagenix	MM Surgical d.o.o.
različne dimenzije	ne	Mölnlycke	Simps'S
različne dimenzije	ne	Lohmann & Rauscher	Lohmann & Rauscher
različne dimenzije, polnila	ne	Lohmann & Rauscher	Lohmann & Rauscher

različne dimenzije	da	Coloplast	Medikal Lux d.o.o.
različne dimenzije	da	Coloplast	Medikal Lux d.o.o.
različne dimenzije	da	BSN Medical	Kastor
različne dimenzije	da	BSN Medical	Kastor
različne dimenzije	da	Mölnlycke	Simps'S
različne dimenzije	da	Hartmann	Hartmann
različne dimenzije	da	Hartmann	Hartmann
različne dimenzije	da	Hartmann	Hartmann
različne dimenzije	da	Lohmann & Rauscher	Lohmann & Rauscher
različne dimenzije	da	Lohmann & Rauscher	Lohmann & Rauscher
različne dimenzije	da	Lohmann & Rauscher	Lohmann & Rauscher
različne dimenzije	da	Curea Medical	Zaloker & Zaloker d.o.o.
različne dimenzije	da	Curea Medical	Zaloker & Zaloker d.o.o.
različne dimenzije	da	Curea Medical	Zaloker & Zaloker d.o.o.
različne dimenzije	da	Curea Medical	Zaloker & Zaloker d.o.o.

različne dimenzije	da	3M	MM Surgical d.o.o.
--------------------	----	----	--------------------

različne dimenzije	da	MedCu	Zaloker&Zaloker d.o.o.
ena dimenzija	da	MedCu	Zaloker&Zaloker d.o.o.